



medi

# medi PT control

Patella-Luxations-SoftOrthese

Patella tracking brace

Orthèse correction de la rotule

Ortesis de rodilla

Gebrauchsanweisung. Instructions for use. Mode d'emploi. Instrucciones de uso.  
Instruções para aplicação. Istruzioni per l'uso. Gebruiksaanwijzing. Brugsvejledning.  
Bruksanvisning. Návod k použití. Uputa za uporabu. Инструкція по використанню.  
Kullanma kılavuzu. Instrukcja zakładania. Οδηγία εφαρμογής. Használati útmutató.  
Інструкція з використання. 使用说明.

medi. I feel better.



1



2



3



4




5



6



7

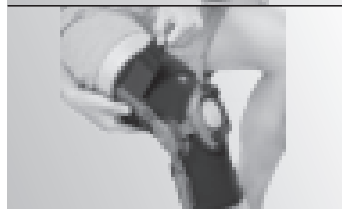

8




9



10



11

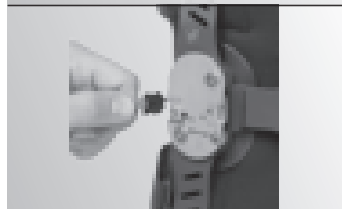

12

# medi PT control

## Назначение

Ортез medi PT control следует использовать для лечения травм и заболеваний, связанных со смещением надколенника. При наличии заболеваний и повреждений кожи в области наложения ортеза изделие не должно непосредственно контактировать с проблемными участками кожи в качестве раневого покрытия.

## Показания

- Консервативное или оперативное лечение вывихов надколенника на фоне незначительной или умеренной нестабильности коленного сустава
- Латерализация надколенника на фоне незначительной или умеренной нестабильности коленного сустава
- Реабилитация после латерального релиза
- Хондропластика надколенника

## Противопоказания

До настоящего времени не выявлены.

## Установка диапазонов сгибания/ разгибания

Вкладыш для ограничения разгибания, EXT: 0°, 10°, 20°, 30°

Вкладыш для ограничения сгибания, FLEX: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°

Возможна иммобилизация под углами: 0°, 10°, 20°, 30°

Для иммобилизации ортеза сначала установите вкладыши для ограничения разгибания, а затем аналогичные вкладыши для ограничения сгибания. Углы иммобилизации на обоих шарнирах ортеза должны одинаковыми.

1. Изначально в шарниры установлены следующие вкладыши: 0° для ограничения разгибания.
2. Чтобы заменить вкладыши, удалите декоративную накладку, потянув ее задний край в сторону от ортеза.
3. Для извлечения вставок воспользуйтесь пинцетом, расположенном на внутренней поверхности декоративной наклейки. Захватите вкладыш за край и вытащите его из пазов (рис. 12). Вставьте новые вкладыши (сначала для ограничения разгибания) таким образом, чтобы расположение меток „UP“ на шарнире и вкладыше совпадало. Щелчок свидетельствует о правильной установке вкладыша.
4. Несколько раз согните и разогните ортез, чтобы убедиться, что вкладыши установлены верно. Закрепите пинцет на внутренней поверхности декоративной наклейки (должен раздаться щелчок). Установите на место декоративные вставки: расположите их таким образом, чтобы стержни с шарообразным концом располагались напротив специальных корзинок, и надавите на наклейку. Характерный щелчок свидетельствует о том, что наклейка закреплена.

## Важная информация

Диапазон сгибания и разгибания можно изменять только по рекомендации врача. Для профилактики чрезмерного разгибания коленного сустава всегда вставляйте вкладыши 0° для ограничения разгибания. Ограничительные вставки четко регулируют амплитуду движения ортеза. Однако, из-за наличия мягких тканей реальная амплитуда движения коленного сустава может отличаться от

заданной. В этом случае нужно заменить вставки с учетом состояния мягких тканей вокруг сустава. Кроме того, если пациент не может согнуть/разогнуть ногу в ортезе до заданного угла, проверьте положение шарниров: их центры должны располагаться на боковой срединной линии на уровне верхнего полюса надколенника.

### Инструкция по надеванию

- Расстегните все ремни и зафиксируйте липучки на поверхности соответствующих ремней, чтобы они не цеплялись друг к другу.
- Согните колено под углом 30° и натяните ортез на ногу (рис. 1).
- Расположите ортез на ноге таким образом, чтобы центры шарниров располагались на боковых срединных линиях на уровне верхнего края надколенника (рис. 2).
- Затяните ремни в следующей последовательности:
  - задний ремень на голени (рис. 3);
  - задний нижний ремень на бедре (рис. 4);
  - верхний ремень С-образной подушки (рис. 5);
  - нижний ремень С-образной подушки (рис. 6) и убедитесь, что С-образная подушка находится сбоку от надколенника и не давит на его переднюю поверхность;
  - задний верхний ремень на бедре (рис. 7);
  - передний ремень на бедре (рис. 8);
  - передний ремень на голени (рис. 9).
- Если это возможно, несколько раз согните ногу в коленном суставе. Если ортез смещается или его фиксация на ноге ослабла, поправьте ортез (рис. 10) и затяните

ремни еще раз в порядке, описанном выше.

---

### Рекомендации по уходу

Перед стиркой извлеките шарниры из мягкой манжеты. Стирайте нейтральным моющим средством вручную при температуре воды 30°. Липучки во время стирки должны быть застегнуты. Тщательно прополощите поскольку остатки мыла могут вызвать раздражение кожи и способствуют ускоренному износу материала. Сушите в расправленном виде вдали от нагревательных приборов.

- Не отбеливать.
- Не отжимать.
- Не сушить в сушильной машине.
- Не гладить.
- Не подвергать химической чистке.



### Инструкция по хранению

Хранить в сухом месте при комнатной температуре. Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей.

### Материалы

Авиональ, полиамид, эластан, полиуретан.

### Гарантия

Согласно законодательству, действующему на территории страны-импортера.

### Утилизация

Изделие следует утилизировать вместе с бытовыми отходами.

### Ваша компания medi

желает Вам скорейшего выздоровления!